



## Botón TightRope® Extender para reconstrucción del LCA

### Técnica quirúrgica




#### Ventajas del botón TightRope Extender:


- Ideal para cuando se rompe la cortical, revisiones y túneles llenos
- Se monta fácilmente en un botón de ACL TightRope sin necesidad de quitar el injerto
- Una huella grande de 20 mm x 5 mm genera el máximo contacto de botón al hueso contra la cortical




# Botón TightRope Extender

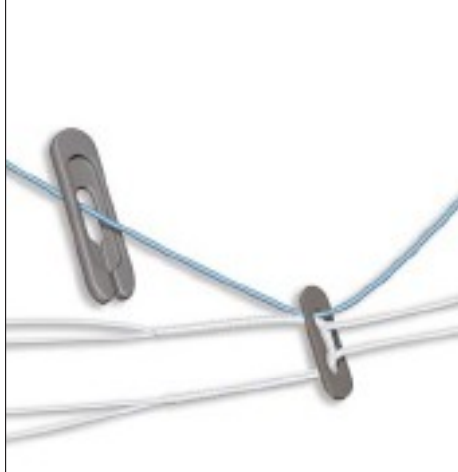


Alinee el botón Extender debajo del botón del ACL TightRope en la orientación en la que pasará. Comience por pasar la sutura azul inferior a través del botón Extender.

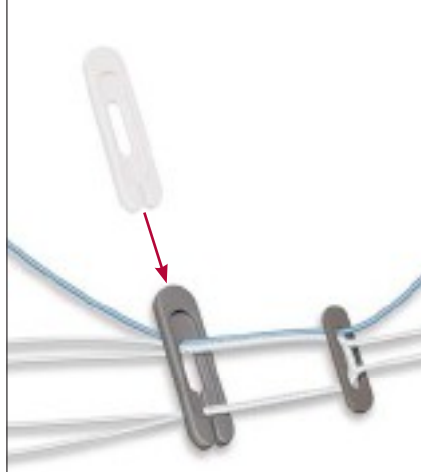

Pase la sección distal de cada lazo a través de la ranura del botón. El botón pasa con mayor facilidad en las partes de las suturas más cercanas al injerto.

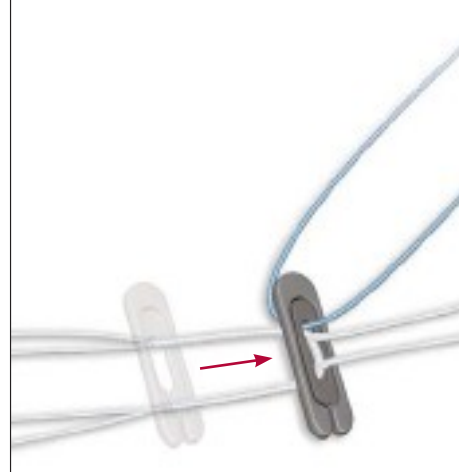

Deslice el botón Extender hacia el botón del ACL TightRope hasta que esté acoplado a la sección moldeada del botón Extender.

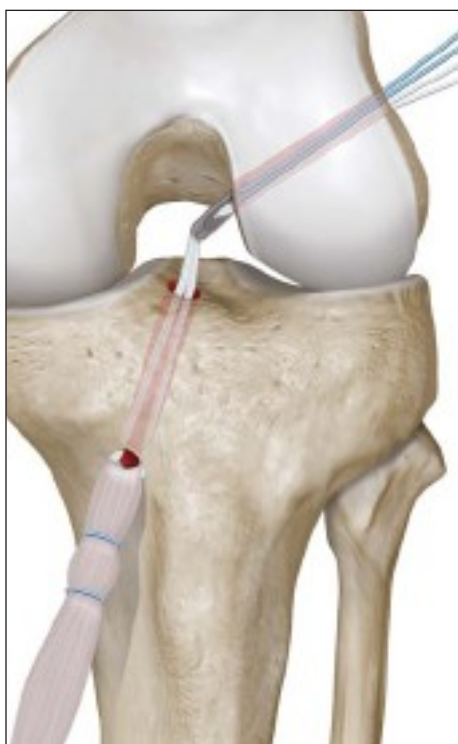


La parte superior del botón Extender debe ingresar al túnel femoral viendo a lateral. Para obtener los mejores resultados, utilice el artroscopio para visualizar el túnel femoral durante el paso del botón. Esto permitirá la visualización del botón al salir del fémur y facilitará el paso y la colocación adecuados del botón.

**Nota:** El tamaño mínimo del túnel para que pase el botón Extender es de 5 mm. El tamaño máximo del túnel en donde el botón Extender puede mantener fijación cortical es de 11 mm.



Una vez que el botón haya salido del túnel femoral, libere las suturas de transporte y tire del injerto para confirmar que el botón se haya colocado en la cortical femoral.

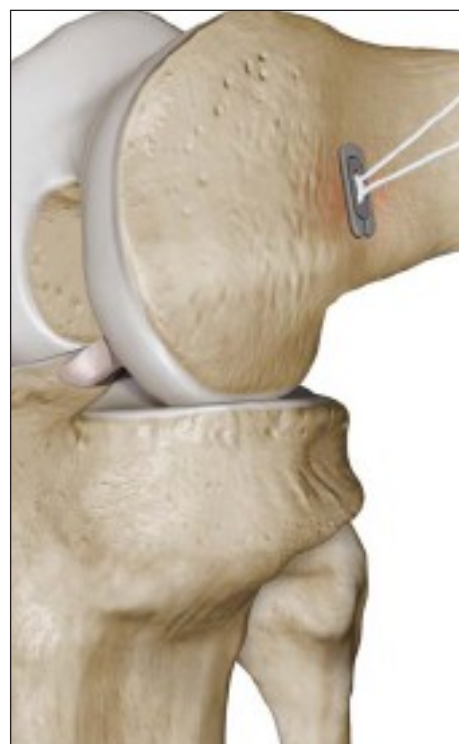

Haga avanzar el injerto tirando de los cabos de acortamiento blancos de a uno por vez. Mantenga contra tensión sobre el injerto para facilitar un avance adecuado del implante. Una vez que haya pasado dentro del túnel la cantidad deseada del injerto, tire del injerto para confirmar su fijación y proceda con la fijación tibial.

El botón Extender provee una huella más grande (20 mm x 5 mm) en comparación con el botón del ACL TightRope original, lo que produce una mayor fijación cortical.

#### Información para realizar pedidos

Botón TightRope  
Extender

AR-1589RT



Dado que el botón Extender es más largo que el botón TightRope, asegúrese de sujetarlo antes de marcar el implante. Esto asegurará que la marca sea una medida visual precisa cuando el botón llegue al final del túnel y se ubique en su posición.



PATENTE EN LOS EE.UU. NO. 6.716.234  
©2013, Arthrex Inc. Todos los derechos reservados

LTI-0153-ES\_A