


9. Das Gerät umdrehen und das Serum durch den Filter aufziehen.



10. Das Serum ist gebrauchsfertig.

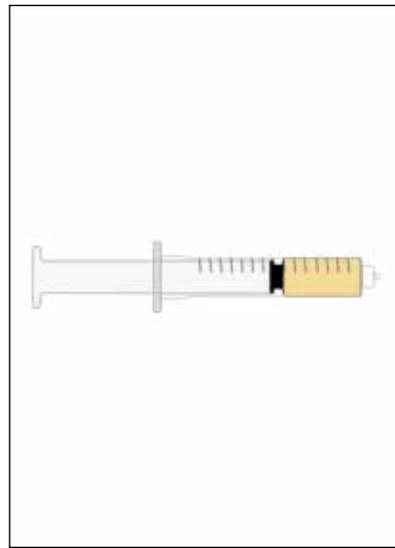

DFU-0275-3-SUB


Rev. 0 01/2020

Für Indikationen und sonstige Informationen
lesen Sie bitte die DFU-0265-XX.


**Thrombinator™ System zur Verwendung mit den
Arthrex-PRP -Systemen (Arthrex Angel® System für
konzentriertes thrombozytenreiches Plasma (cPRP)
oder Arthrex-Doppelspritzen-(ACP-)System)**

 **Arthrex, Inc.** 
1370 Creekside Blvd. 2797
Naples, FL 34108-1945 • USA
Gebührenfrei: +1 (800) 934-4404
www.arthrex.com


 **Arthrex GmbH**
Erwin-Hielscher-Straße 9
81249 München, Deutschland
Tel.: +49 89 909005-0
www.arthrex.de

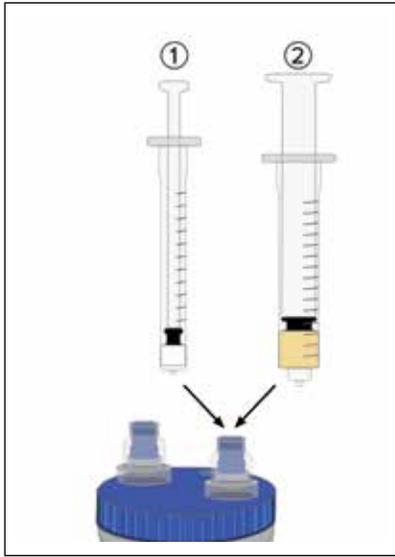

1. 0,1 ml CaCl_2 + 4 ml Eigenblutanteil hinzufügen.

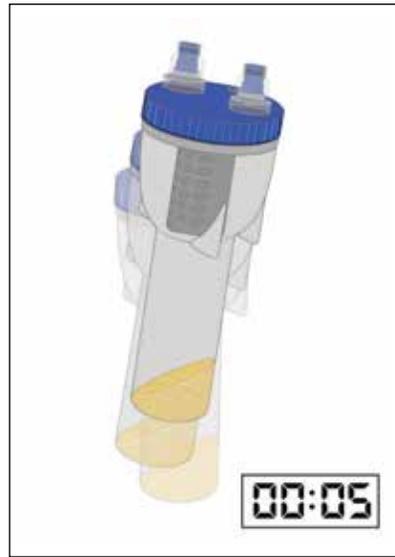


2. Zum Vermischen der Inhaltsstoffe das Gerät für 5 Sekunden schütteln.

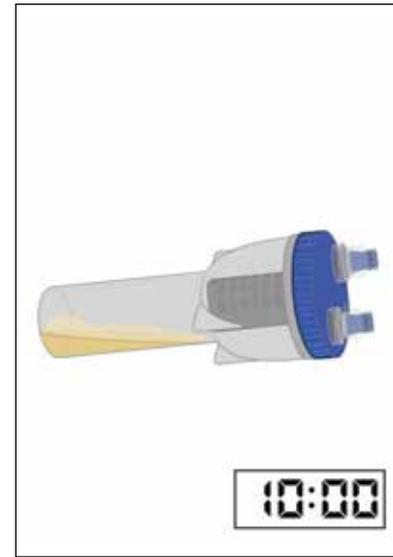


3. Das Gerät flach hinstellen und mindestens 10 Minuten warten, bis Anzeichen von Gelierung zu erkennen sind.




4. Das Gerät zur Lösung des Gerinnsels schütteln.

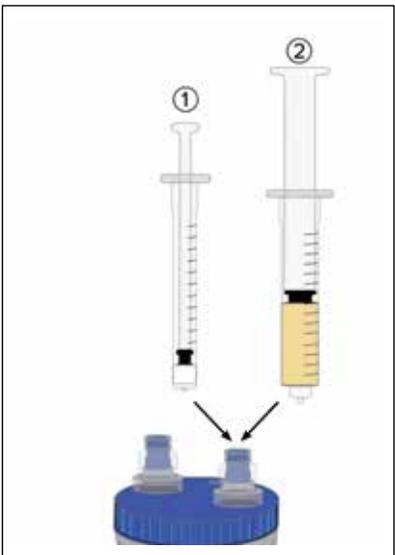


5. 0,2 ml CaCl_2 + 8 ml Eigenblutanteil hinzufügen.

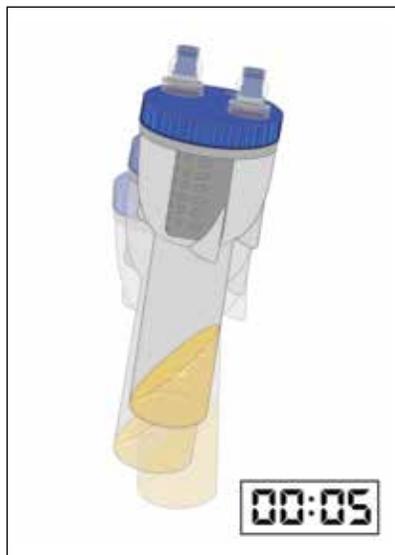

6. Zum Vermischen der Inhaltsstoffe das Gerät für 5 Sekunden schütteln.

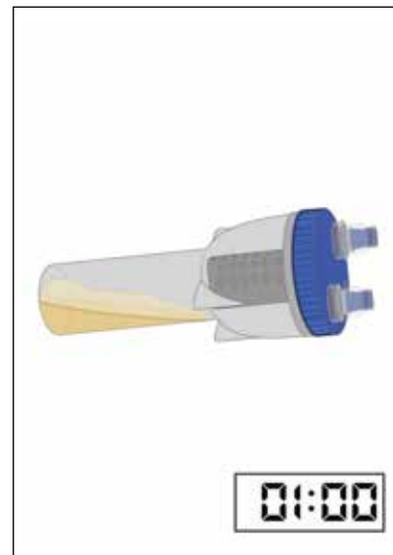

7. Das Gerät flach hinstellen und eine Minute warten.

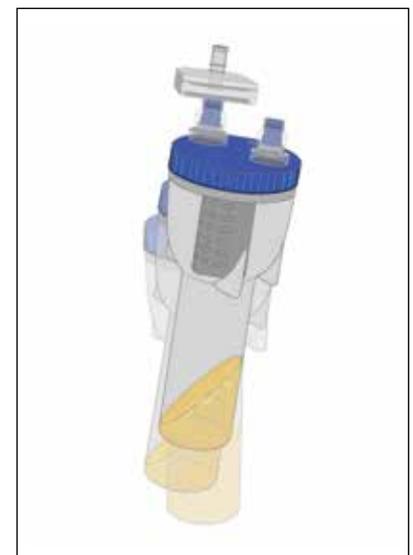

8. Das Gerät zur Lösung des Gerinnsels schütteln und den Filter am Anschluss zum Aufziehen aufsetzen.
Weiter auf der Rückseite