


SNELSTART GIDS VOOR SYNERGY RF AR-9800

UITPAKKEN Pak alle componenten voorzichtig uit en controleer ze op transportschade. Bewaar de verpakking voor toekomstig transport van het apparaat. De voetschakelaar wordt apart geleverd. De sonde wordt apart geleverd en is in steriele verpakking.

Gebruikers moeten de Synergy^{RF}™ gebruikershandleiding en ApolloRF™ Sonde DFU lezen voordat ze deze apparaten gebruiken. De gebruikershandleiding en gebruiksaanwijzingen bevatten de indicaties en contra-indicaties voor gebruik, waarschuwingen, symbool definities en de volledige lijst van productinstructies. U kunt deze documenten vinden op Arthrex.com.

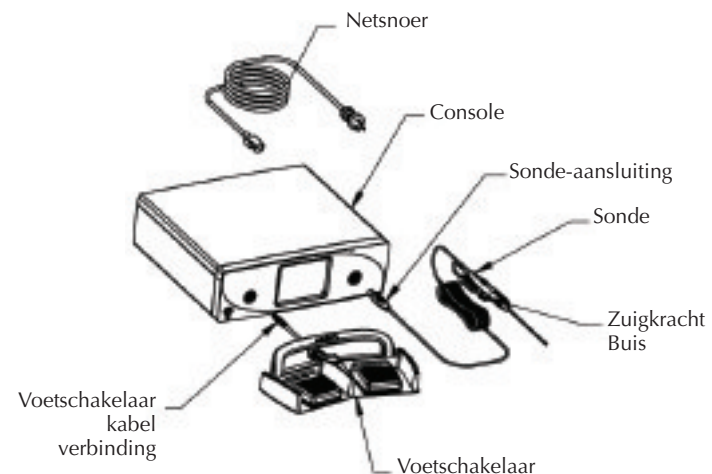

Opstelling




1 Plaats de console op een horizontaal, droog oppervlak



2 Sluit het netsnoer aan op de console



3 Sluit het netsnoer aan op het stopcontact

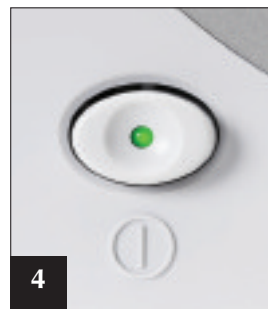


4 Schakel de console aan




5 Wacht tot de console is geïnitieerd



6 Bevestig de sonde via de verbinding aan de console

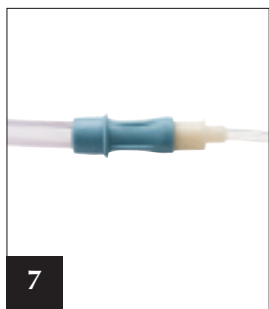


7 Voor zuigsondes, moet de bevestigingszuigslang worden aangesloten

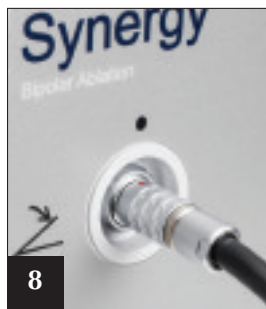

8 Bevestig de voetschakelaar indien gewenst



9 Wijzig de instellingen met behulp van het aanraakscherm

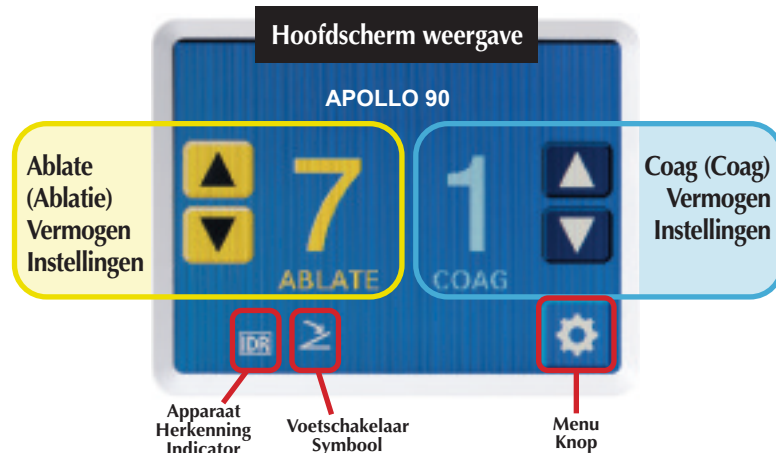

Probleemoplossing: Storingen en oplossingen

STORING	OPLOSSING
De eenheid gaat niet aan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Controleer de stekker van de stroomtoevoer en de wandcontactdoos. 2. Controleer de hoofdzekeringen in de gebruikershandleiding instructies. 3. Bel Arthrex technische ondersteuning op 1-888-420-9393.
Bijbehorende RF-sonde werkt niet	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ontkoppel de sonde los en sluit deze opnieuw aan. 2. Schakel de console uit, wacht 30 seconden, schakel de console opnieuw aan. 3. Ontkoppel de voetschakelaar en koppel deze opnieuw aan, indien van toepassing. Vervang de voetschakelaar, indien deze niet werkt. 4. Open nieuwe RF-sonde.
Gele foutmelding	Raadpleeg de gebruikershandleiding voor de juiste maatregel.
Rode foutmelding (Kritieke fout)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maak een opmerking van het weergegeven bericht. 2. Bel Arthrex technische ondersteuning op 1-888-420-9393.
Om het apparaat te retourneren of te laten repareren kunt u contact opnemen met Arthrex-productbewaking op 1-866-267-9138.	

Arthrex, Inc.

1370 Creekside Blvd.
Naples, FL 34108-1945, VS
Gratis telefoonnummer: 1 (800) 934-4404
www.arthrex.com

Arthrex technische ondersteuning:
+1-888-420-9393

Arthrex GmbH

Erwin-Hielscher-Strasse 9
81249 München, Duitsland
Tel:+49 89 909005-0
www.arthrex.de

+49 89 90 90 05 8800

Om de instellingen te wijzigen



1. Druk op de menu-instellingsknop



2. Druk op de gewenste instelling



Voor taal:

Selecteer de gewenste taal en voer vervolgens een van de volgende handelingen uit:

Druk op de **THUISKNOP** om de instelling op te slaan en terug te keren naar het hoofdscherm

-OF-

Druk op de **instelknop** om de instelling op te slaan en terug te keren naar **MENU**

-OF-

Druk op **X** om terug te keren naar **MENU** zonder de standaardwaarde te wijzigen



Voor het negeren van de voetschakelaar:

Selecteer de gewenste optie en voer vervolgens een van de volgende handelingen uit:

Druk op de **THUISKNOP** om de instelling op te slaan en terug te keren naar het hoofdscherm

-OF-

Druk op de **instelknop** om de instelling op te slaan en terug te keren naar **MENU**

-OF-

Druk op **X** om terug te keren naar **MENU** zonder de standaardwaarde te wijzigen



Voor volume:

Selecteer het gewenste volume met de + of - knoppen en voer vervolgens een van de volgende handelingen uit:

Druk op de **THUISKNOP** om de instelling op te slaan en terug te keren naar het hoofdscherm

-OF-

Druk op de **instelknop** om de instelling op te slaan en terug te keren naar **MENU**

-OF-

Druk op **X** om terug te keren naar **MENU** zonder de standaardwaarde te wijzigen

Knopactivering

1. Ablatievermogen instelling
2. Ablate (Ablatie)
3. Coag (Coag)

