


INSTRUKCJA OBSŁUGI

Niniejszy dokument nie zastępuje ani nie jest nadrzędny wobec Instrukcji użytkowania Systemu NanoScope. Przed użyciem urządzenia użytkownicy muszą przeczytać Instrukcję użytkowania nanoskopu. Instrukcja użytkownika zawiera wskazania i przeciwwskazania dotyczące użytkowania, ostrzeżenia, definicje symboli oraz pełną listę instrukcji dla produktu. Niniejszy dokument można znaleźć na stronie Arthrex.com, jak również w pakiecie z systemem NanoScope.

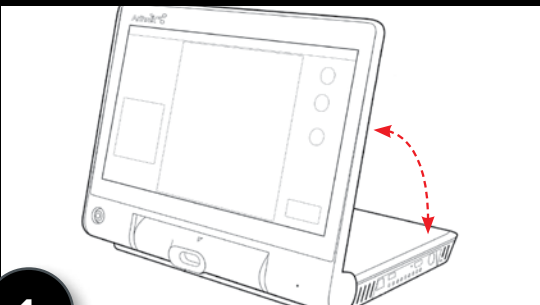

1

Konsolę NanoScope należy umieścić na stosownej płaskiej i stabilnej powierzchni antypoślizgowej. Dostosować do pozycji najlepszej dla użytkownika.




2

Konsolę należy umieścić w pobliżu miejsca kontaktu z pacjentem, poza przewidzianym polem jałowym.




3

Podłączyć do zasilacza lub upewnić się, że poziom naładowania baterii jest wystarczający dla spodziewanego czasu trwania zabiegu.

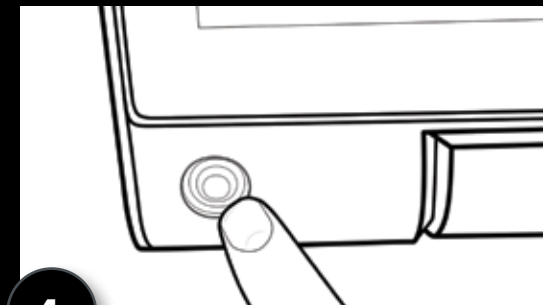

4


Włączyć konsolę i upewnić się, że świeci się zielona kontrolka zasilania. Zalogować się za pomocą danych uwierzytelniających, wprowadzić dane demograficzne pacjenta lub podłączyć kamerę NanoScope w celu szybkiego uruchomienia.

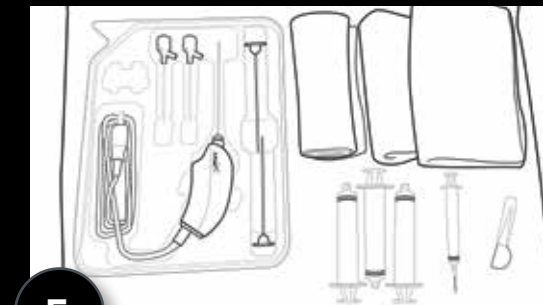

5

Przygotować pole jałowe i otworzyć zestaw rękojeści NanoScope.

(Należy założyć rękawice chirurgiczne.)

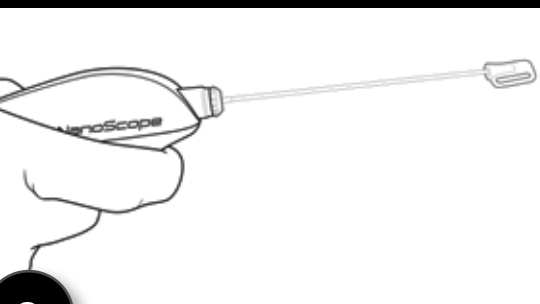

6

Upewnić się, że nasadka kalibracyjna znajduje się na swoim miejscu.


(Pole jałowe należy utrzymać w następujących krokach.)



7


Włożyć końcówkę złącza rękojeści do konsoli NanoScope, aż do całkowitego osadzenia.

(Uwaga: Konsola nie jest jałowa.)

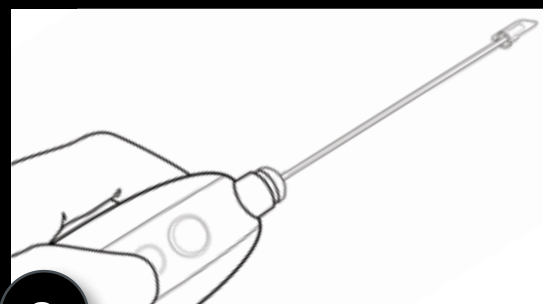

8


Po wyświetleniu monitu należy przeprowadzić kalibrację za pomocą jednego z przycisków na rękojeści. Upewnić się, że nasadka jest zainstalowana.

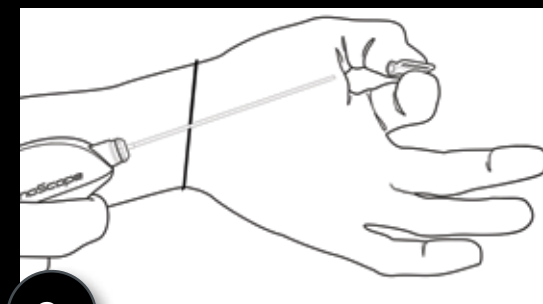

9


Zdjąć nasadkę z kamery i umieścić w polu jałowym.

(Uwaga: Nie wyrzucać nasadki do momentu zakończenia procedury. Nasadka może zostać użyta do ponownej kalibracji.)

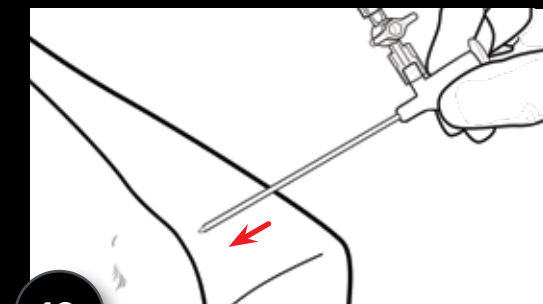


10

Umieścić trokar/obturator w kaniuli i włożyć do stawu/jamy ciała.

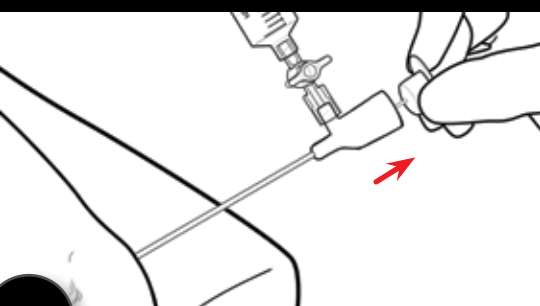


11

Wyjąć trokar/obturator, jednocześnie pozostawiając wprowadzoną kaniulę. Przyłączyć zarządzanie płynami (w razie potrzeby).

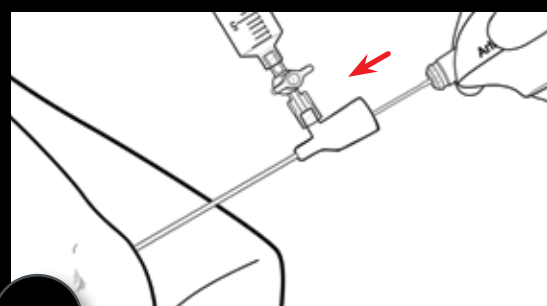


12

Umieścić rurkę podskórną rękojeści NanoScope w kaniuli i zablokować w miejscu.

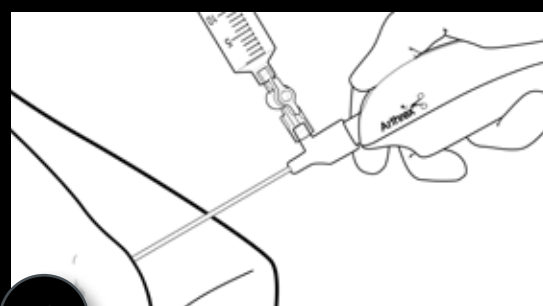

13


Manipulować rękojeścią NanoScope w celu wizualizacji anatomii wewnętrznej. W razie potrzeby włączyć płyn w celu poprawy wizualizacji.

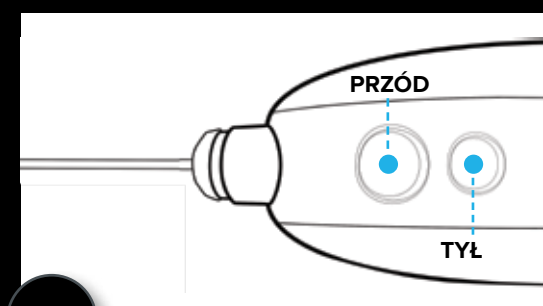

14

Obrazy i materiał wideo można przechwytywać za pomocą przycisków na uchwycie NanoScope.

(Domyślnie: Przód = przechwytywanie obrazu, Tył = przechwytywanie wideo)

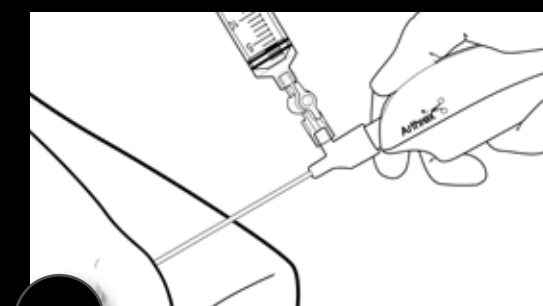

15

Po zakończeniu zaaspirować przestrzeń stawową/jamę ciała i użyć strzykawki(-ek) do usunięcia wprowadzonego płynu.

NanoScope

System do artroskopii



16



Po zakończeniu zabiegu należy wyrzucić zestaw rękojeści NanoScope wraz z akcesoriami do odpowiedniego pojemnika na odpady ostre stanowiące zagrożenie biologiczne.

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zestaw do obrazowania artroskopowego NanoScope™ umożliwia lekarzom przeprowadzanie artroskopii diagnostycznej za pomocą jednorazowej kamery podłączanej do przenośnego tabletu HD.

Arthrex, Inc.
1370 Creekside Blvd.
Naples, FL 34108-1945 USA
1-800-934-4404

www.arthrex.com

Pomoc techniczna Arthrex
1-888-420-9393

W celu zwrotu lub naprawy wyrobu należy skontaktować się z Arthrex Product Surveillance (Nadzorem nad Produktami firmy Arthrex)
1-866-267-9138



© 2020 Arthrex, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
DFU-0338-SUBr0

