

Taxa de queixas no pós-operatório da sutura FiberTape®

Pesquisa e Desenvolvimento Arthrex

Objetivo

O objetivo deste estudo é identificar a taxa de queixas da sutura FiberTape no pós-operatório.

Métodos e materiais

A Arthrex compilou uma lista exaustiva de todos os códigos de produto que usam a sutura FiberTape. Reunimos os dados de vendas de toda a vida útil desses produtos, de julho de 2003 a janeiro de 2016. Compilamos as queixas, que foram separadas em três categorias: todas as queixas; queixas relacionadas à sutura FiberTape e queixas relacionadas a possíveis reações à sutura FiberTape.

Resultados

Na tabela abaixo, estão os produtos contendo sutura FiberTape e as respectivas taxas das queixas que também contemplam a sutura FiberTape, cujas vendas tenham se dado de julho de 2003 a janeiro de 2016¹.

Categoria	Queixas	Taxa de queixas	Razão das queixas
1. Todas as queixas	238	0,0150%	<15 por 100.000
2. Relacionada à sutura FiberTape	41	0,0026%	<3 por 100.000
3. Possíveis reações à sutura FiberTape	27	0,0017%	<2 por 100.000



Figura 1. Sutura FiberTape

Conclusão

Nos dados de queixas compilados para esta análise, observa-se claramente que o risco de reação nos tecidos é muito baixo com a sutura FiberTape fabricada pela Arthrex, Inc. A Arthrex afirma que a segurança e a eficácia de nossos materiais criteriosamente selecionados contribuem para desfechos seguros e bem-sucedidos para o paciente.

Referência

- Arthrex, Inc. Dados em arquivo.