


BRUKSANVISNING

Detta dokument är inte avsett att ersätta bruksanvisningen till Nanoscope-systemet. Användaren måste läsa bruksanvisningen till Nanoscope innan produkten används. Användarhandboken innehåller information om indikationer och kontraindikationer, varningar, symboldefinitioner samt fullständiga anvisningar för produkterna. Detta dokument återfinns på Arthrex.com och medföljer även Nanoscope-systemet.

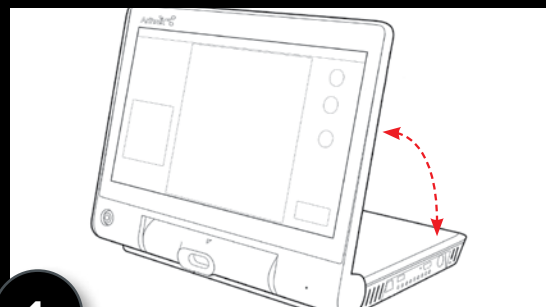

1

Placera NanoScope-konsolen på en lämplig plan, stabil och halkfri yta. Justera den till bästa möjliga position för användaren.




2

Placera konsolen nära patientkontaktområdet, utanför det avsedda sterila fältet.




3

Anslut den till en nätadapter eller säkerställ att batteriladdningen är tillräcklig för ingreppets förväntade varaktighet.

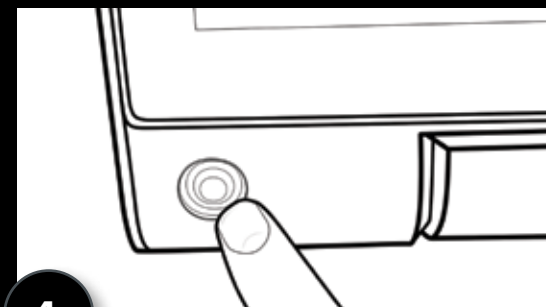

4


Slå på konsolen och bekräfta att den gröna strömlampan lyser. Logga in med dina inloggningsuppgifter, skriv in patientens demografiska uppgifter eller koppla in NanoScope-kameran för en snabbstart.

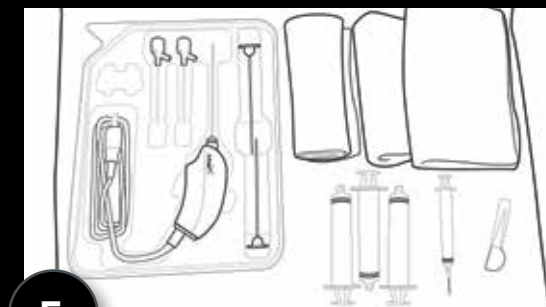

5

Förbered det sterila fältet och öppna NanoScope-handstycksatsen.


(Ta på operationshandskar.)

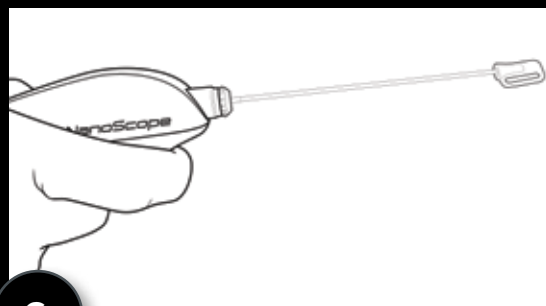

6

Säkerställ att kalibreringslocket sitter på plats.


(Upprätthåll det sterila fältet under efterföljande steg.)

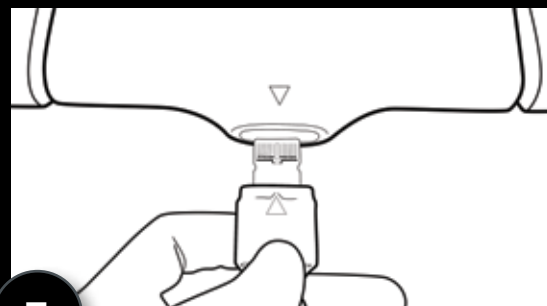

7


Sätt i handstyckets kontaktdonsände ordentligt i NanoScope-konsolen.

(Anm: Konsolen är inte steril.)

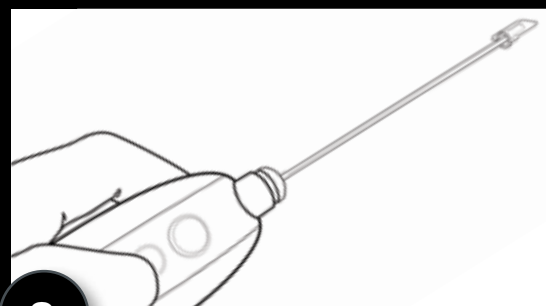

8


Utför kalibrering med hjälp av valfri knapp på handstycket när du uppmanas att göra detta. Säkerställ att locket är insatt.

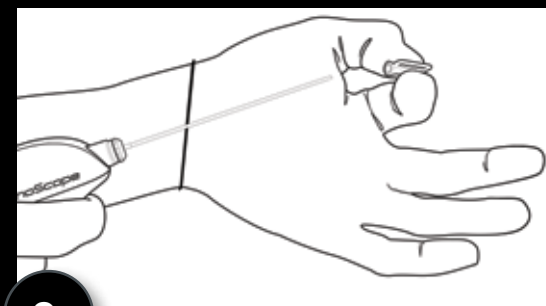

9


Ta av locket från kameran och lägg det i det sterila fältet.

(Anm: Kasta inte bort locket innan ingreppet är över. Locket kan användas för omkalibrering.)

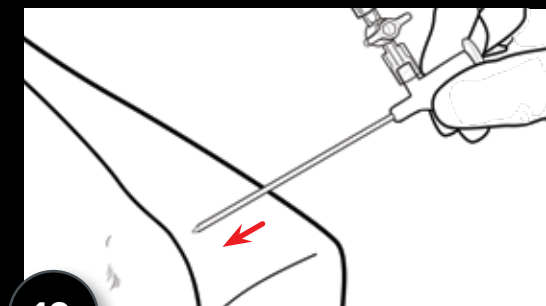


10

För in troakaren/obturatorn i kanylen och gå in i leden/ledhålan.

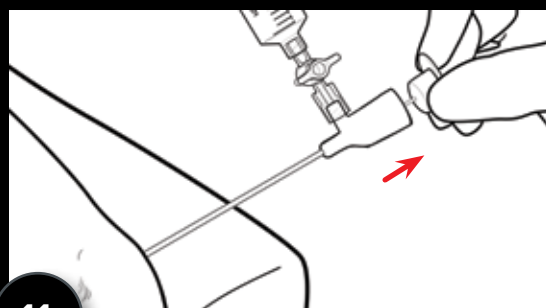

11

Avlägsna trokaren/obturatorn och lämna kvar kanylen på plats. Anslut vätskesystem (om så önskas).

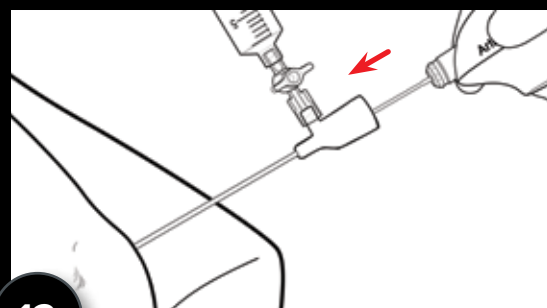


12

För in NanoScope-handstyckets tunnväggiga rör i kanylen och lås det på plats.



13


Manipulera NanoScope-handstycket för att visualisera anatomin i leden/ledhålan. Spruta in vätska efter behov för att underlätta visualisering.

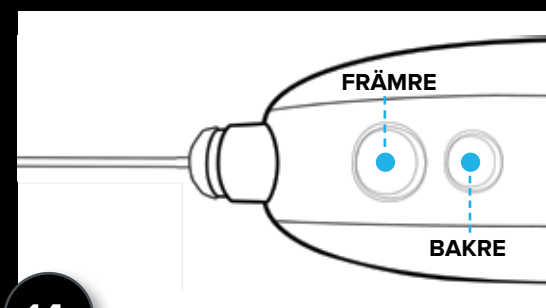

14

Använd knapparna på NanoScope-handstycket för att ta bilder och spela in videor.

(Standardinställning: Främre = bildtagning, Bakre = videoinspelning)

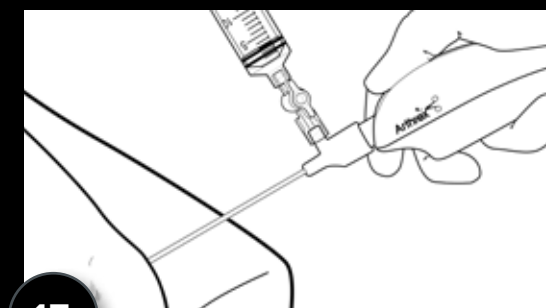

15

Efter avslutat ingrepp, aspirera ledutrymmet/ledhålan och använd en eller flera sprutor för att avlägsna den insprutade vätskan.

NanoScope

Artroskopisystem



16



Efter avslutat ingrepp, kasta NanoScope-handstycksatsen och tillbehören i en behållare för smittförande, stickande och skärande avfall.

SNABBGUIDE

Med NanoScope™-lösningen för artroskopisk avbildning kan läkaren utföra en diagnostisk artroskopi med hjälp av en engångskamera som ansluts till en HD-surfplatta.

Arthrex, Inc.
1370 Creekside Blvd.
Naples, FL 34108-1945 USA
1-800-934-4404

www.arthrex.com

Arthrex Teknisk support
1-888-420-9393

För att returnera eller reparera en produkt,
kontakta Arthrex Product Surveillance
(Arthrex produktövervakning)
1-866-267-9138



© 2020 Arthrex, Inc. Alla rättigheter förbehålles.
DFU-0338-SUBr0

